

## ***Inocare Knieschiene***

*Knieführungsorthese  
mit Patella-Aussparung im Gelenk*

Inocare Knieschiene für Erwachsene



- PRODUKTINFORMATION -  
- GEBRAUCHSANWEISUNG -

## Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in ein Produkt von **inocare®**.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung. Sie haben ein Produkt erworben, das einem hohen medizinischen und qualitativen Standard entspricht. Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Daher unterlaufen alle unsere Produkte eine strenge Qualitätskontrolle. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Verkaufsstelle, von der Sie das Produkt erhalten haben. Wir sind für unbürokratische Lösungen bekannt.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und wenden Sie sich bei Fragen an den behandelnden Arzt oder an Ihr Fachgeschäft.

---

### Wichtige Hinweise

**Die erstmalige Anwendung bzw. Anpassung dieses Produktes darf nur durch geschultes Fachpersonal oder durch einen Arzt erfolgen, andernfalls wird eine Produkthaftung ausgeschlossen.**

Dies ist ein verordnungsfähiges Produkt, das unter ärztlicher Anleitung getragen werden sollte. Es sollte nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung und bei den aufgeführten Anwendungsgebieten getragen werden.

Das Produkt ist zur einmaligen Versorgung des Patienten (kein Wiedereinsatz) vorgesehen. Eine Veränderung am Produkt darf nicht vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung kann die Leistung des Produktes beeinträchtigt werden. In diesem Fall oder bei sonstiger unsachgemäßer Anwendung oder zweckentfremdetem Einsatz ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

Sollten Sie außergewöhnliche Veränderungen an sich (z.B. Zunahme der Beschwerden, Schwellungen, Hautveränderungen o.ä.) feststellen, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

Eine Kombination mit anderen Produkten muss vorher mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Bitte lassen Sie das Produkt nicht mit fett- oder säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotionen in Berührung kommen.

Garantie wird gewährt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Die Entsorgung des Produktes kann i.d.R. problemlos über den Hausmüll vorgenommen werden. Bitte beachten Sie dabei aber auch evtl. regionale behördliche Vorgaben.

Hinsichtlich bestehender Rückgabemöglichkeiten zur ordnungsgemäßen Verwertung der Verpackung beachten Sie bitte die Hinweise der jeweiligen Verkaufsstelle, von der Sie das Produkt erhalten haben.

**Inocare Knieschiene:** Knieführungssorthese mit Patella-Aussparung und Gelenk  
(Art. Nr. 525)

**Produktbeschreibung**

- Knieführungssorthese mit Patella-Aussparung
- seitlich geführte Metallschienen mit Gelenk
- geteilte Ausführung
- vier zirkuläre Klettverschlüsse zur Umfangjustierung und Fixierung sorgen für optimale Anpassung
- kann als Rehab-Schiene oder auch als Sport-Schiene getragen werden
- funktionelle Ausführung für einfaches An- und Ausziehen
- höchste Qualität durch speziell perforiertes Neoprenmaterial

**Lieferumfang**

- Neben dem eigentlichen Produkt (Inocare Knieschiene) ist bei der Lieferung enthalten:
- Produktinformation/Gebrauchsanweisung

**Optionales Zubehör, erhältliche Ersatzteile**

Für diesen Artikel sind weder weiteres Zubehör noch Ersatzteile erhältlich.

**Indikation**

- Prä- und postoperative Ruhigstellung
- Postoperative Nachversorgung in der Kniechirurgie
- zur Vermeidung einer Subluxation der Tibia
- nach anteriorer Kreuzbandverletzung oder –rekonstruktion
- zur sicheren Stabilisierung verletzter oder operativ versorgter Bänder

Die Indikation wird letztlich vom Arzt definiert.

**Wirkungsweise**

- laterale und mediale Stabilisierung des Knies
- auch als Gipsersatz

**Nebenwirkungen, Kontraindikationen**

Nebenwirkungen, die den Organismus betreffen, sind bis jetzt nicht bekannt.  
Das sachgemäße Anwenden bzw. Anlegen wird vorausgesetzt.

Für andere als die o.a. Indikationen sollte das Produkt nicht eingesetzt werden, es sei denn der verordnende Arzt hat es so entschieden.

**Material** 3-Schicht Neoprenmaterial



- durchblutungsfördernd
- muskelunterstützend und -aktivierend
- hygienisch und schmutzabweisend
- sehr strapazfähig
- hautfreundlich und atmungsaktiv
- schweiß- und wärmeregulierend

Sehr hautfreundliches Material mit flexiblen Klettverschlüssen.


**Maßabnahme und Größentabelle**



Kinder

Angaben in cm

Größe	XXS	XS
Umfang (U)	21-23	23-35

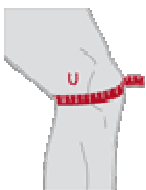

**Maßabnahme**

U= Umfang Kniemitte  
(über Patella gemessen)

**Auswahl, Anprobe, Abgabe**

Bitte messen Sie gem. den Angaben oben und wählen Sie entsprechend aus der Größentabelle das passende Produkt aus.

Bei der Abgabe des Produktes ist der richtige Sitz zu prüfen.

**Gewährleistung**

Wir gewähren Gewährleistung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, vorausgesetzt das Produkt wurde unter Berücksichtigung der vorgenannten Bedingungen und nur zu dem vorgesehenen Zweck sowie unter Berücksichtigung der Gebrauchshinweise eingesetzt. Ausdrücklich sei erwähnt, dass dies auch den einmaligen Gebrauch einschließt.

## Konformitätserklärung

Wir, **inocare® Medical GmbH**, erklären in alleiniger Verantwortung, dass unsere Medizinprodukte – *Inocare Knieschiene* – allen Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entsprechen.

## Pflege



Handwäsche, nicht bleichen, nicht bügeln, keine chemische Reinigung, nicht im Trockner trocknen.

Wir empfehlen, das Produkt bei 30°C mit einem Feinwaschmittel zu waschen. Die Trocknung sollte nicht in direkter Hitze erfolgen (Heizkörper, Sonneneinstrahlung, usw.).

Untersuchen Sie die Orthese vor jedem Gebrauch auf Verschleiß.

Falls ein Gurt oder ein anderes Teil der Orthese zu starkem Verschleiß aufweist, muss diese vor weiterer Verwendung vom Fachhändler wieder instand gesetzt werden.

Alle Polster und Gurte sind einfach abnehmbar und können mit Handwäsche z.B. in einer milden Seifenlauge gereinigt und an der Luft getrocknet werden.

Das Verwenden eines handelsüblichen Desinfektionsmittels ist bei Bedarf möglich.

Falls die Orthese mit Schmutz oder Salzwasser in Kontakt gekommen sein sollte so ist sie mit Wasser abzuspülen und an der Luft zu trocknen.



**Beispiele weiterer Bandagen / Orthesen aus unserem Programm:**





***inocare*<sup>®</sup> Medical GmbH**  
Eiterbacher Str. 16 | D-69253 Heiligkreuzsteinach  
Tel.: +49 6220 913 354 | Fax: +49 6220 922 3220  
E-Mail: [info@inocare.de](mailto:info@inocare.de) | [www.inocare.de](http://www.inocare.de)